


サイズ・機能

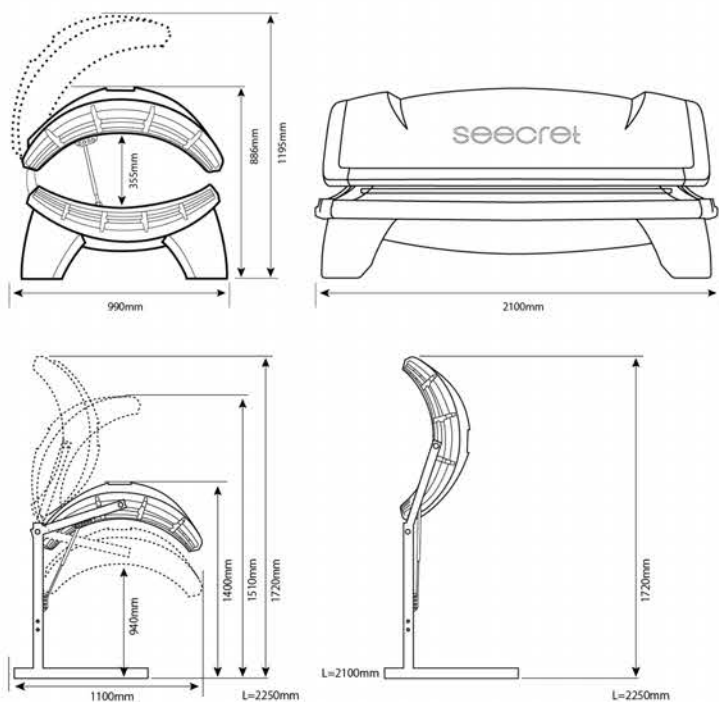

Seecret C200

| | |
|---------------|------------|
| シークレットランプ(上部) | 14本×100ワット |
| | 12本×100ワット |
| Reflector | SRS* |
| ボディ用冷却ファン | ○ |
| アラーム | ○ |
| 使用時間表示 | ○ |
| デジタルタイマー | ○ |
| 出力 | 2,82キロワット |
| 色 | シャンパンホワイト |
| 重量 | 約123kg |

Seecret C180

| | |
|---------------|----------------|
| シークレットランプ(上部) | 14本×100ワット |
| 顔用ランプ | 5本×25ワット |
| Reflector | SRS* |
| ボディ用冷却ファン | ○ |
| アラーム | ○ |
| 使用時間表示 | ○ |
| デジタルタイマー | ○ |
| 出力 | 1,81キロワット |
| 色 | シャンパンホワイト |
| 重量 | 約81kg (キャスター抜) |

保管用

ヨーロッパ発の最新全身フォトエステマシン

seecret
「シークレット」

SEECRET C200、C180 取扱説明書

フォトエステマシン「SEECRET」総販売元

株式会社スペースグッドタイム(旧ミキシア・イノベックス株式会社)

東京駅八重洲口ショールーム 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-2 小林ビル本館2F-2

TEL:03-6280-5396 FAX:03-6280-5397 info@goodtime.co.jp

http://goodtime.co.jp

警告

次に該当するお客様には、使用させないようにして下さい。

- ペースメーカー、人工心肺、心電計など医療用電子機器を使用中の方
 - 心臓疾患、急性疾患、発熱、血圧異常、感染症、皮膚トラブル、炎症
怪我など、健康がすぐれない方
 - 妊娠中、生理中の方
- 医療機器の誤動作や事故、トラブルのおそれがあります。

使用時のご注意

- 美容目的以外には使用しないで下さい。
- 使用時間や使用頻度を厳守して下さい。
- 万一、痛感や不調を感じたら直ちに使用を中止して下さい。

次のような場合は使用しないで下さい。

- コードやアダプターなどが傷んでいたり、熱くなったりする
 - コンセントへの差し込みがゆるい
- 火災や感電、ショート、やけどのおそれがあります。


メンテナンス時のご注意

マシンのメンテナンス時には、次のことにご注意下さい。

- 必ずトランスのブレーカーをOFFにするか、
コンセントを抜いていることを確認して下さい。
- アクリル板は破損しやすいので必ず2名以上で行って下さい。
- 軍手など手を守るものを身につけて行って下さい。

- 機器を傷つけたり、破損したり、加工しないようにして下さい。
- 機器の上に重いものを乗せたり挟み込んだりしないようにして下さい。
- 湿度の高い場所、水のかかりやすい場所には設置しないで下さい。
- 万一、破損などによる機器の不調がある場合は使用を中止して下さい。

SEECRET C200の操作方法

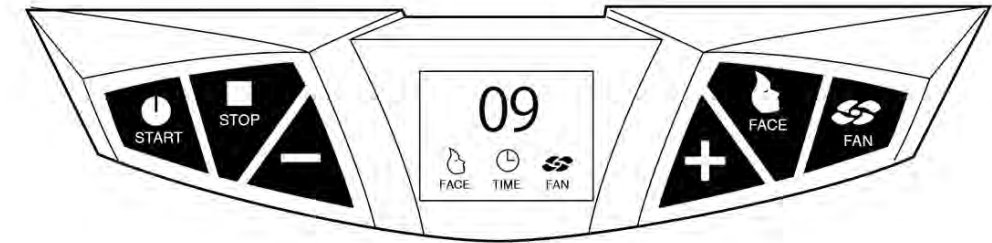

始動

「スタート」を一度押してから「+」と「-」ボタンを用いて照射時間を設定します。
設定後、もう一度押すとランプが点灯します。
「一時停止」の状態にある時のみ、「スタート」ボタンが使用できます。



停止

「ストップ」を一度押すとマシンが「一時停止」します。
ライトが消灯しますが、通気は続行します。
「ストップ」を2回押すと、3分間のアフタークーリングフェーズを開始します。
この3分間はマシンを始動できません。



03

アフタークーリングの図



- 照射時間を減らす
- ボディクーラー用のファンの速度を下げる



- 照射時間を増やす
- ボディクーラー用のファンの速度を上げる



フェイス…c200では、カウンターランプのチェック時操作以外使用しません



ファン…
ボディクーラーのオン/オフを切り替える



時間カウンターランプx10



時間カウンターランプのリセット



サンベッド時間カウンターx10

概要

次の手順でマシンの設定時間を変えることができます。



10秒長押しします。



「+」「-」ボタンで時間を設定します。
(30分に設定する場合は「30」にします)



「スタート」ボタンを1回押して
警告音が鳴ったらセット完了です。

注意:照射時間は最大30分に制限されています。


表示メッセージ



オーバールールエラー
(回路基板またはディスプレイ基板の不具合)



フィルターガラスの不具合
(フィルターガラスが故障している。
またはガラス保護に不具合がある)

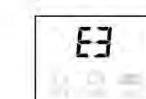

通信エラー
(回路基板とディスプレイ基板間に通信がない)

注意:LCD画面に上記のエラーメッセージのいずれかが表示された場合は、本装置の使用を中止し、プラグをコンセントから抜いた上で販売店にお問合せ下さい。

その他



この記号は、サンベッド時間が500時間になるとLCD画面に表示されます。サンベッド時間が500時間になった場合はランプを新しいものと交換することが好ましいです。ランプの交換後はランプ時間カウンターをリセットして下さい。


注意:装置背面にあるラベルに、本装置に適したランプが明記されています。

SEECRET C200のメンテナンス方法

注意事項


1. 感電防止のため、トランスのブレーカーをOFFにするか、コンセントを抜いていることを必ず確認して下さい。
2. アクリル板は破損しやすいので必ず2名以上で行って下さい。
3. 軍手など手を守るものを身につけて行って下さい。

- 1** 手指の保護のために軍手などを着用します。

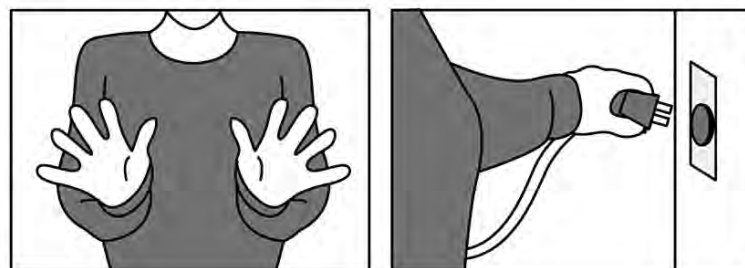


- 2** トランスのブレーカーをOFFまたはコンセントを抜きます。


- 3** まずは下部からお手入れを行います。両サイドのカバーを「パチン」と音がする所まで上げて下さい。

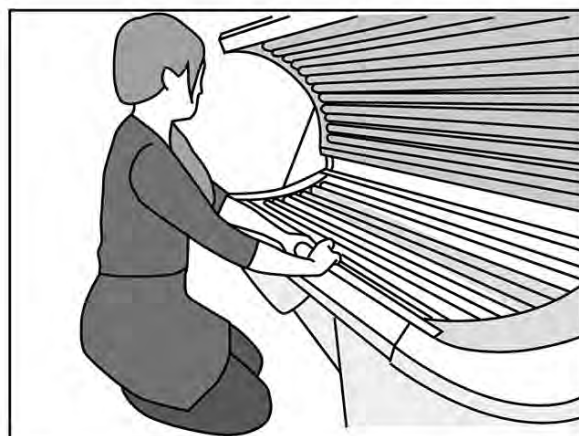


- 4** 正面両サイドに付いているアクリルハンガーを取り外します。

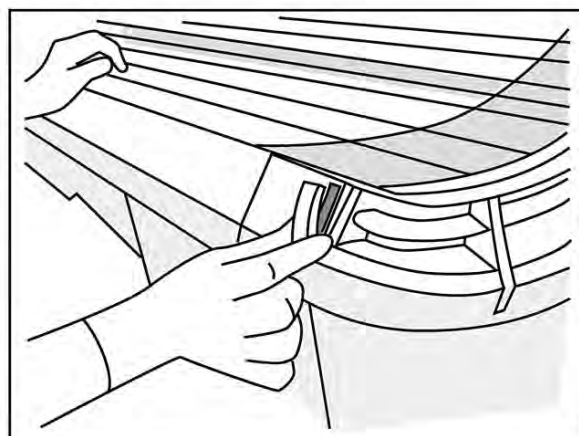


- 5** アクリルハンガーを用いて、スライドさせる要領でアクリル板を外します。

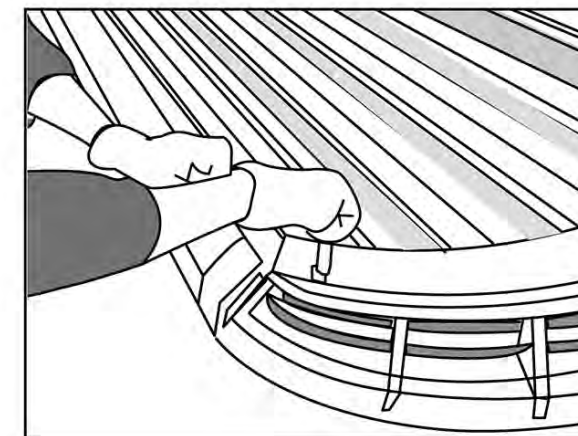

- 6** 外したアクリル板は割れやすいので2名以上で作業し、必ず両端を持ち、広い場所に置いて下さい。

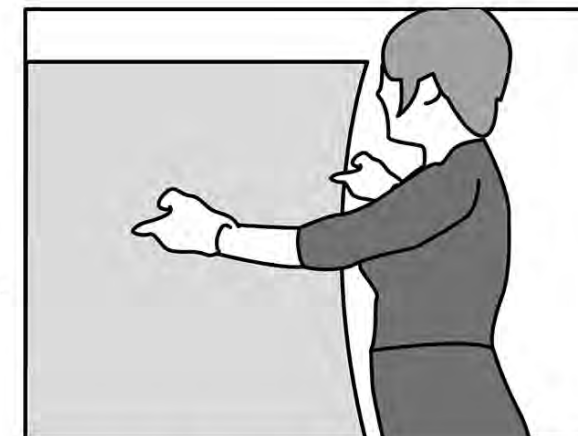


- 7** 操作パネル側についている黒い金属板も、アクリル板と同様に取り外すことができます。

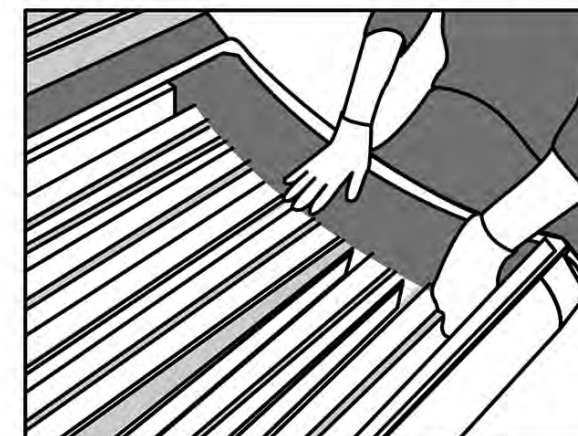


- 8** ランプを固く絞った雑巾等で水拭きして下さい。



9 底面のホコリは、ハンドモップ等を使用して頂くと簡単に取れます。

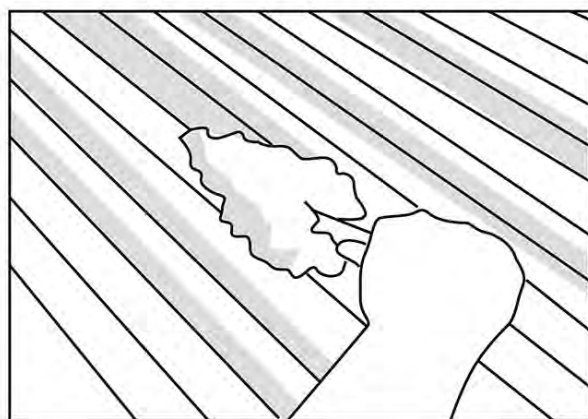


10 (底面の汚れがひどい場合) ランプを90度回転させるとランプを外すことができます。底面の汚れがひどい場合、底面を水拭きして下さい。

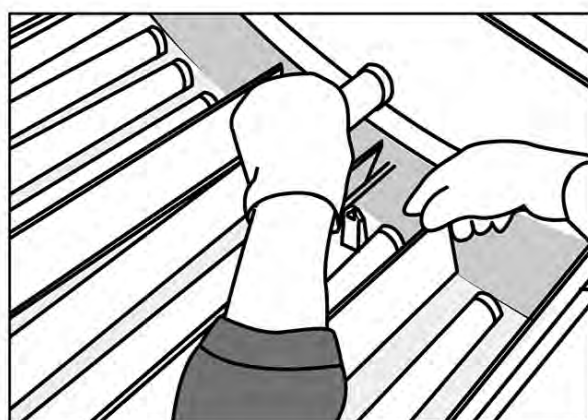

11 金属板、アクリル板を元に戻して完了です。



12 反対側も同様の手順で掃除を行います。

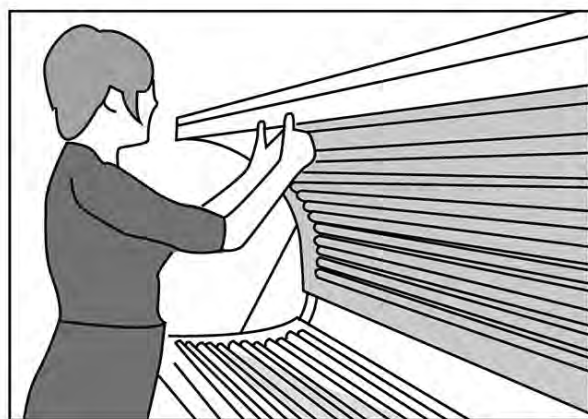

★動画もご用意しております。
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HAFOIAWKL6Y

youtubeで検索!! コラーゲンマシン メンテナンス




SECRET C200の入り方

正しい入り方



1. ゆっくりと腰を掛けて

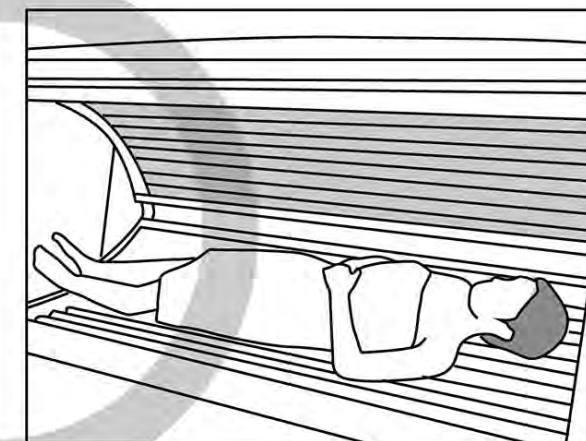

2. 横に寝そべるように倒れましょう

誤った入り方


下記のような入り方は、アクリル板が割れる可能性があり大変危険です!



手をつけて体重をかける



足から入る

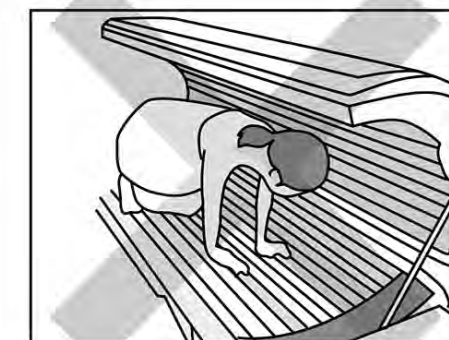

アクリル板に膝をつく